

# Vcheck cCortisol




## 쿠싱증후군 및 애디슨병 진단을 위한 Cortisol 검사

Cortisol은 부신피질에서 정상적으로 분비되는 호르몬으로, 당 및 지방 대사에 관여합니다. 쿠싱증후군(Cushing's disease)은 개에서 가장 흔하게 나타나는 내분비 질환 중 하나로서, ACTH 자극 시험, 저농도 덱사메타손 억제 시험(LDDST) 등의 cortisol 농도 측정을 통해 진단할 수 있습니다.

## 언제 Cortisol을 측정해야 할까요?

- 쿠싱증후군과 애디슨병의 진단 및 치료 반응 모니터링할 때 필요합니다.
- 뇌하수체 의존성 부신피질기능항진증(PDH)과 부신피질 종양(AT)을 감별할 때 필요합니다.
- 부신질환 진단 후, 장기적 치료반응 모니터링할 때 필요합니다.

## 평가 자료

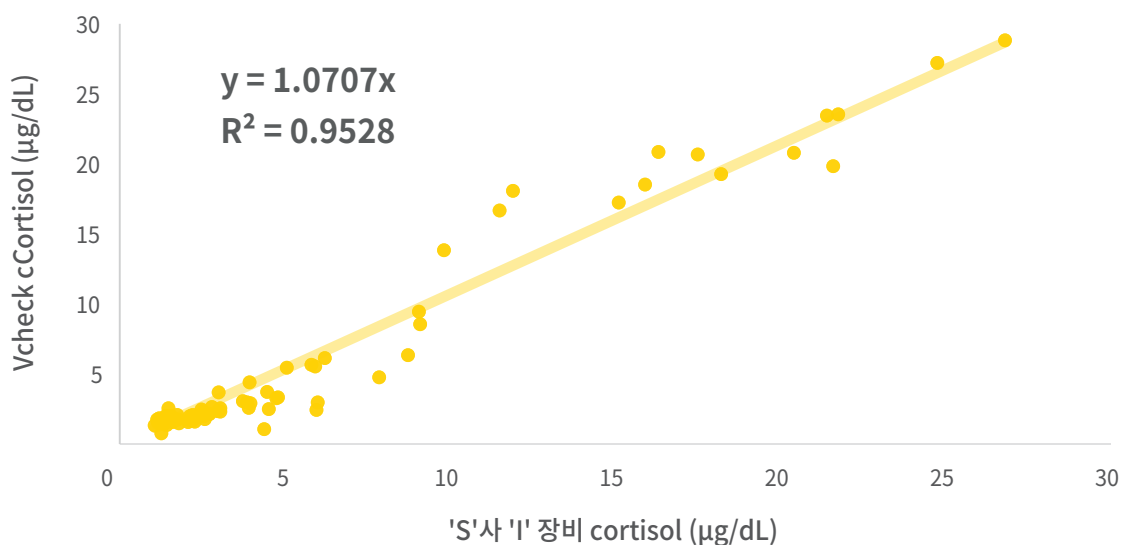

# Cortisol 분비 이상의 임상증상

## 쿠싱증후군 (Cushing's disease)

다뇨/다음  
다식  
혈떡임  
복부 팽창('pot-belly')  
내분비성 탈모  
기력저하  
근육손실


## 애디슨병 (Addison's disease)

무기력  
식욕부진  
구토  
기력저하

## 검사 방법

1

검체  
50  $\mu$ l

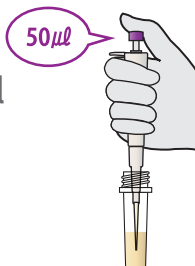

2

혼합  
5~6 회




3

인큐베이션  
10 분



4

점적  
100  $\mu$ l

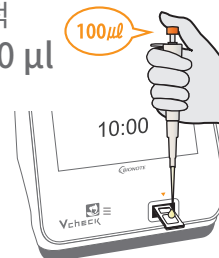

## 제품 사양



검체  
혈청 50  $\mu$ l



측정 범위  
1~30  $\mu$ g/dl



검사 시간  
20 분

## 주문 정보

제품 번호	제품명	보관 온도	포장 단위
VCF105DD	Vcheck cCortisol	2~8 °C	10 Tests/Kit