



Quick guide


이전 검사 결과 삭제 방법 (Vcheck V200)

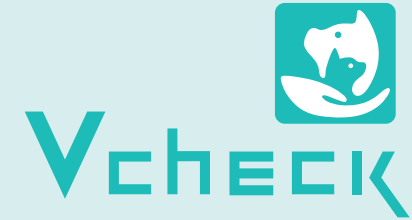


- * [Selected Results] 삭제 방법은 기존과 동일합니다.
- * 검사결과 확인 페이지에서 [모두 삭제하기]의 경우 별도의 팝업창이 나오지 않고, 바로 삭제됩니다.
- * ① 100개 미만 데이터의 경우 삭제 설정 단위는 100표시.
② 100 ~ 2,000개 데이터의 경우 삭제 설정 단위는 저장된 최대 데이터로 표시.
(e.g., ① 저장 데이터: 7개 → 삭제 설정단위: 100 표시,
② 저장 데이터: 999개 → 삭제 설정단위: 999 표시)
* 단, 설정 단위는 100 단위로 수정 가능합니다.
- * 결과 데이터 삭제 시 칼리브레이션 정보는 삭제되지 않습니다.

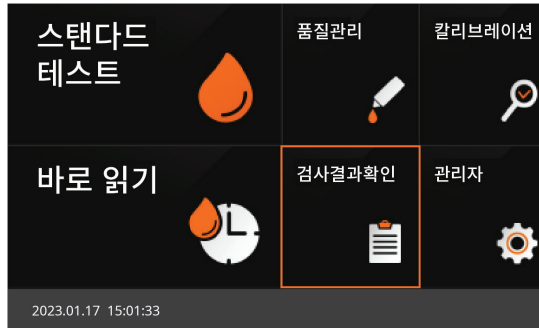


1 Vcheck V200 장비를 켜고, [검사결과 확인]을 누릅니다.

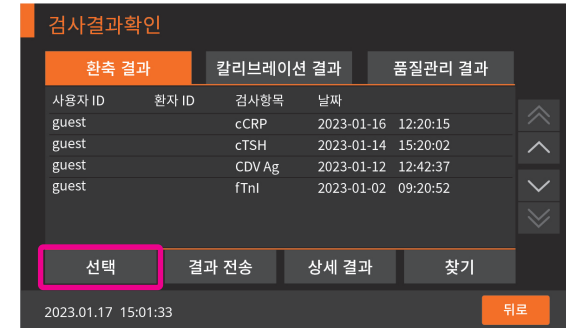

2 검사결과확인 페이지에서 [선택] 버튼을 클릭합니다.

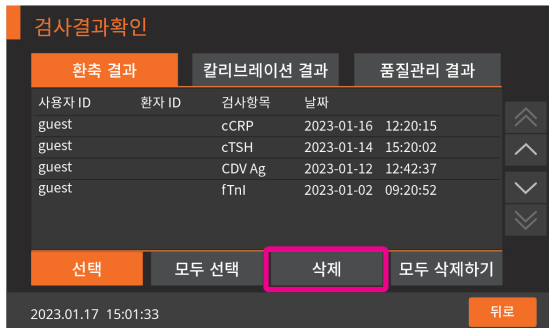

3 [삭제] 버튼을 클릭합니다.

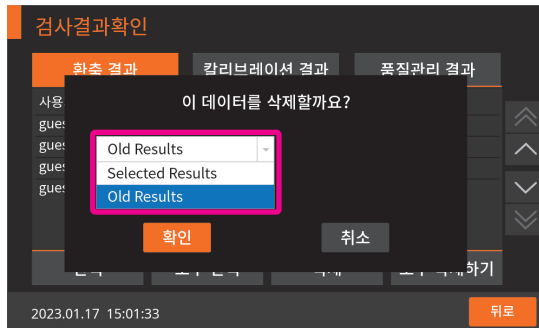

4 팝업창이 나타나면 [Old Results] 옵션을 선택합니다.



5 데이터는 최소 100개에서 최대 2,000개까지 설정 후 삭제할 수 있습니다.