

CDV Ag _개 디스토펙퍼 항원 진단 키트

제품 소개

효능/효과 : 개 디스토펙퍼 바이러스 항원 검출

사용검체 : 안구 분비물, 비말, 타액, 뇨, 혈청, 혈장

제품구성 :


- BIONOTE Rapid CDV 검사 Device
- 점적용 드롭퍼
- 검체 희석액이 든 검체 채취 튜브
- 검체 채취용 면봉

특징 :


- CDV 신속진단
- 민감도 91.8%, 특이도 98.5% (PCR 대비)




검사 방법

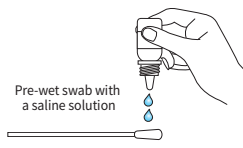


1. 개의 안구 분비물, 비말 등을 면봉으로 채취한다.

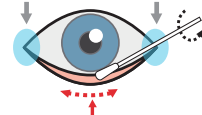

2. 검체 희석액이 든 검체 채취 튜브에 검체가 묻은 면봉을 넣은 후 10회 정도 면봉을 돌려준다.

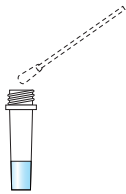

3. 추출이 끝난 면봉을 튜브의 벽면에 대고 돌려 짜주면서 빼낸다.

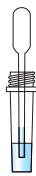

4. 이물질이 가라앉도록 20초간 정지시킨 후 드롭퍼를 이용하여 상층액을 채취한다.



5. 검체 점적함에 4방울 떨어 뜨린다.



검사결과 판독

제품 정보

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
RG1103DD	CDV Ag	Device	10 Tests/Kit