

# CPV/CCV Ag \_개 파보/코로나 항원 동시 진단 키트

## 개 파보/코로나 항원 동시 진단 키트의 의의

개 파보 바이러스와 코로나 바이러스는 개에게 설사를 일으키는 대표적인 전염성 소화기 질환입니다. 감염 초기에는 파보 바이러스 감염과 코로나 바이러스 감염이 구분이 안될 뿐 아니라 동시 감염에 대한 위험성이 있으므로 동시 진단 키트를 사용하는 것을 추천합니다. 파보 바이러스와 코로나 바이러스의 동시 감염은 파보 단독 바이러스 감염보다 매우 나쁜 예후를 보입니다.

## 제품 소개

효능/효과 : 개 파보, 코로나 바이러스 항원 검출

사용검체 : 분변 (Anal swab or Fresh feces)

제품구성 :

- BIONOTE Rapid CPV/CCV 검사 Device
- 점적용 드롭퍼
- 검체 희석액이 든 검체 채취 튜브
- 검체 채취용 면봉 (별도포장)


특징 :

- CPV/CCV 신속 진단
- 증상이 유사한 두 질병의 동시 진단




## 검사 방법

[ 면봉으로 채취하는 검체량 ]

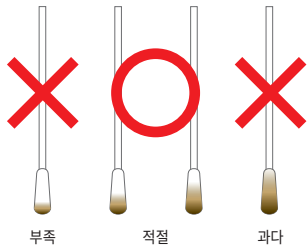

1. 분변을 면봉으로 채취한다. (직장 내 면봉을 이용하여 분변 채취 추천, 배변 후 채취 시 신선한 분변만 검사 유의)

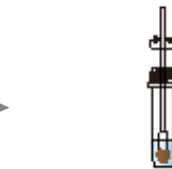

2. 검체 희석액이 든 검체 채취 튜브에 분변이 묻은 면봉을 넣은 후 10회 정도 면봉을 돌려준다.



3. 추출이 끝난 면봉을 튜브의 벽면에 대고 돌려 짜주면서 빼낸다.



4. 이물질이 가라앉도록 20초간 정지 시킨 후 드롭퍼를 이용하여 상층액을 채취한다.



5. 검체 점적흡에 4방울 떨어 뜨린다.

5-10분

검사결과 판독

## 제품 정보

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
RC1105DD	CPV/CCV Ag	Dual Device	10 Tests/Kit